



LES QUESTIONS À SE POSER LORSQUE MON LIT TOMBE EN PANNE



LA PRISE EST-ELLE BRANCHÉE AU SECTEUR ?

» Si non, brancher la prise

LES FILS SONT-ILS RELIÉS ?

» Si non, relier les fils




LES FILS TOUCHENT-ILS LE SOL ?


» Si oui, relever les fils




SI LA TÉLÉCOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PLUS

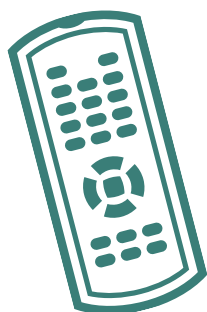

TÉLÉCOMMANDE AVEC AIMANT ATTACHÉ AU FIL

- » Passer l'aimant devant le logo  sur la télécommande.
- » Cela enclenche de nouveau le fonctionnement

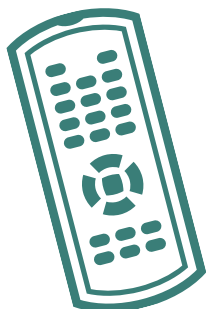

TÉLÉCOMMANDE AVEC CLÉ ATTACHÉ AU FIL

- » Vérifier au dos que celle-ci n'est pas verrouillé
- » Vérifier chacune des fonctions de la commande

**SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ NOUS
AU 04 77 31 45 99**