



LES QUESTIONS À SE POSER LORSQUE MON VERTICALISATEUR NE FONCTIONNE PAS



LA PRISE EST-ELLE BRANCHÉE ?

» **OUI**: Débrancher puis rebrancher la prise

**SI LE PROBLÈME PERSISTE APRÈS DÉBRANCHEMENT :**

LE BOUTON ROUGE EST-IL ENFONCÉ ?

» Faire un quart de tour



**SI LE QUART DE TOUR NE MARCHE PAS :**




LE BOUTON ROUGE ENFONCÉ ET CHARGÉ EN MEME TEMPS ?

» Déconnexion du système



## EN CAS DE PROBLÈME AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

---

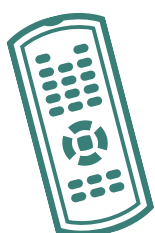

### LA TÉLÉCOMMANDE BIP ?

---

Cela signifie qu'elle n'a plus de batterie

» Recharger la batterie



### PAS DE VOYANT SUR LA TÉLÉCOMMANDE ?

---

La batterie peut alors être mal enfoncée

» Repositionner la batterie

**SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ  
NOUS AU 04 77 31 45 99**

