



PROCÉDURE DE GONFLAGE



» ÉTAPE 1

Pré-gonfler le coussin, pour l'équilibre des compartiments du coussin, SANS le patient avec le bouton marche/arrêt.

» ÉTAPE 2


Positionner le patient sur le coussin avec les règles de positionnement suivantes :

- Dos calé sur le dossier
- Bras hors accoudoirs
- Pieds posés sur les cales-pieds

» ÉTAPE 3

Ajuster la pression en fonction du poids et du tour de taille du patient.

Exemple : 80kg + 120 cm (tour de taille)
→ PRISME 3

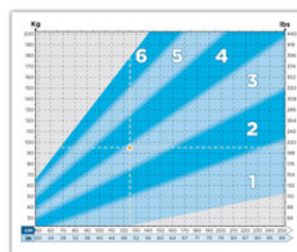

» ÉTAPE 4

A l'aide de la télécommande, ajustez la pression au niveau affiché par le prisme

