



LES QUESTIONS A SE POSER LORSQUE MON VERTICALISATEUR NE FONCTIONNE PAS



LA PRISE EST-ELLE BRANCHÉE ?

» **OUI**: Débrancher puis rebrancher la prise

SI LE PROBLÈME PERSISTE APRÈS DÉBRANCHEMENT :

LE BOUTON ROUGE EST-IL ENFONCÉ ?

Faire un quart de tour



SI LE QUART DE TOUR NE MARCHE PAS :



LE BOUTON ROUGE ENFONCÉ ET CHARGÉ EN MEME TEMPS ?

» Déconnexion du système




EN CAS DE PROBLÈME AVEC LA TÉLÉCOMMANDE



LA TÉLÉCOMMANDE BIP ?

Cela signifie qu'elle n'a plus de batterie

» Recharger la batterie

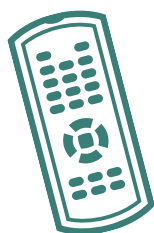

PAS DE VOYANT SUR LA TÉLÉCOMMANDE ?

La batterie est mal enfoncée

» Repositionner la batterie

**SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ
NOUS AU 04 77 31 45 99**

